

NL

Thealoz Duo Gel

Dit product is een medisch hulpmiddel. Lees de gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Bewaar deze bijsluiters. Misschien moet u deze later opnieuw lezen.

INDICATIES

THEALOZ DUO GEL is geïndiceerd voor de bescherming, hydratatie en lubricatie (smering) van het oog bij de behandeling van matig tot ernstig droge ogen syndroom.
Uitsluitend oculair gebruik.

GESCHIKT VOOR

- Volwassenen,
- Kinderen: Ouders of verzorgers dienen het product toe te dienen,
- Zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven, gebruik op basis van de huidige kennis.

CONTRA-INDICATIES

Niet inspuiten en niet inslikken.
Gebruik THEALOZ DUO GEL niet bij allergie voor één van de bestanddelen (zie productbeschrijving).

PRODUCTBESCHRIJVING

THEALOZ DUO GEL is een ooggel bestaande uit trehalose (3%), natriumhyaluronaat (0,15%), carbomeer (Carbopol 974P, 0,25%), sorbitol, natriumhydroxide en water voor injecties.

THEALOZ DUO GEL is een steriele, fosfaatvrije, hypotone en pH-neutrale vloeibare gel.

THEALOZ DUO GEL is mild voor de ogen aangezien het geen conserveermiddelen bevat. De afwezigheid van conserveermiddelen zorgt voor de bescherming van oculaire weefsels en veroorzaakt geen reacties bij gebruikers die gevoelig zijn voor conserveermiddelen.

VOORDEEL, FUNCTIE EN WERKINGSMECHANISME

THEALOZ DUO GEL wordt aanbevolen in geval van ongemak, een gevoel van prikken, een zandkorrelgevoel of irritatie van het oog ten gevolge van matige of ernstige droge ogen. Deze symptomen kunnen worden veroorzaakt door externe factoren zoals wind, rook, vervuiling, stof, zonnige of koude omstandigheden, droge hitte, airconditioning, vliegtuigreizen, lange uren voor een beeldscherm en oogchirurgie zoals refractieve en cataractoperaties.

THEALOZ DUO GEL biedt onmiddellijk comfort aan de ogen en langdurige verlichting van de symptomen van droge ogen zoals hierboven beschreven.

De voornaamste bestanddelen van THEALOZ DUO GEL zijn trehalose, natriumhyaluronaat en carbomeer (Carbopol 974P).

Trehalose is een natuurlijke stof aanwezig in veel planten en dieren, die hierdoor kunnen overleven in extreem droge omstandigheden. Het biedt beschermende en hydraterende eigenschappen.

Natriumhyaluronaat, van nature aanwezig in het menselijk oog, houdt water vast en zorgt aldus voor een verhoogde hydratatie en smering van het oogoppervlak. Bovendien zorgt het voor een betere hechting van het product aan het oogoppervlak, wat een langdurige verlichting biedt en de herstelperiode van het oogoppervlak verkort.

Carbomeer zorgt ervoor dat THEALOZ DUO GEL langer op het oogoppervlak blijft en biedt daardoor langdurige verlichting van symptomen van droge ogen.

De unieke combinatie van trehalose, natriumhyaluronaat en carbomeer in THEALOZ DUO GEL biedt vooral langdurige bescherming, hydratatie en lubricatie (smering) van het oogoppervlak.

ALGEMENE AANBEVELINGEN VOOR GEBRUIK

Dosering: 1 druppel in elk oog, 1 tot 4 maal daags.

Echter, omdat het een gel is, is THEALOZ DUO GEL bijzonder geschikt voor gebruik 's avonds, vlak voor het slapen gaan.

Er is geen specifieke training vereist voor het gebruik van THEALOZ DUO GEL.

Bij het dragen van contactlenzen dienen deze verwijderd te worden voor het gebruik van THEALOZ DUO GEL.

Wacht na gebruik minimaal 30 minuten voordat u uw lenzen weer terugplaatst.

Was de handen grondig voor gebruik.

Open de folie van het zakje en breek één verpakking voor éénmalig gebruik (unidosis) van de strip.

Plaats de rest van de strip terug in het zakje.

Gebruik geen enkel voorwerp om de unidosis te openen.

Draai de flacon ondersteboven, schud zachtjes en tik op de flacon tot de gel naar beneden zakt.

Open de flacon door de bovenkant eraf te draaien.

Raak de punt van de flacon met geen enkel voorwerp aan om besmetting te voorkomen.

Knijp tot je de druppel ziet.

Breng één druppel aan in de conjunctivale zak, terwijl u het onderste ooglid zacht naar beneden trekt en ondertussen naar boven kijkt. Sluit het oog zachtjes bij het einde van de toediening. Gooi de flacon weg, zelfs als er nog gel overblijft. Bewaar de flacon niet.



VOORZORGEN BIJ GEBRUIK

Controleer of de verpakking intact is voor het eerste gebruik: gebruik alleen als de zakjes en de unidosissen ongeopend zijn.

Raak de punt van de flacon met geen enkel voorwerp aan om besmetting te voorkomen.

Hergebruik de unidosis niet, na opening is de inhoud niet meer beschermd tegen microbiële verontreiniging.

Contacteer een zorgverlener indien uw symptomen erger worden of niet verbeteren.

WAARSCHUWINGEN

Buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Bestuur na gebruik geen voertuigen en gebruik geen machines als uw zicht wazig is: wacht enkele minuten totdat uw zicht weer helder is.

Wacht minimaal 15 minuten tussen het gebruik van twee verschillende oogproducten. THEALOZ DUO GEL dient als laatste gebruikt te worden.

BIJWERKINGEN

De volgende bijwerkingen zijn gemeld: plakkerige ogen, wazig zien, allergische reacties (zoals overgevoeligheid, zwelling van het ooglid, uitslag), oogafscheiding, uitzonderlijke gevallen van oogirritatie, oogpijn en roodheid van de ogen.

Wanneer u een ooggel gebruikt, kunt u gedurende korte tijd last hebben van storende symptomen, zoals een branderig gevoel, een stekend gevoel, het gevoel dat er zich een vreemd voorwerp in het oog bevindt en wazig zien.

Als u na het gebruik van dit product bijwerkingen of ongebruikelijke gewaarwordingen constateert, neem dan contact op met een zorgverlener en rapporteer de informatie aan de lokale distributeur, aan de fabrikant of aan uw lokale gezondheidsinstantie (zie contact aan het einde van de gebruiksaanwijzing).

BEWAAR- EN VERNIETIGINGSVOORWAARDEN

Bewaar tussen 8 °C en 30 °C.

Stel het product niet bloot aan direct zonlicht of vochtigheid.

Gooi de unidosis onmiddellijk na gebruik weg, zelfs als er nog gel in zit.

Bewaar de ongeopende unidosis in het zakje om het tegen licht te beschermen.

De ongeopende unidosissen kunnen worden gebruikt tot één maand na de eerste opening van het zakje. Niet gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op de unidosissen en op de buitenverpakking.

De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand zolang de verpakking intact is en correct is bewaard.

Gooi het product op een correcte verantwoorde manier weg en in overeenstemming met de lokale richtlijnen (de flacon moet worden weggegooid als huishoudelijk afval, de buitenverpakking en de bijsluiters zijn recycleerbaar).

Uitgavedatum en versie van de gebruiksaanwijzing:

Ver. 10 04/2024

Fabrikant:

 Laboratoires Théa
12 rue Loires Blériot
63017 Clermont-Ferrand Cedex 2 Frankrijk

www.laboratoires-thea.com

Sectie « Contact us »

BE

Verdeler:

Théa Pharma, Poortakkerstraat 91/0301
9051 Gent, www.thea.be

Gezondheidsinstanties:

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en
Gezondheidsproducten. Galileelaan 5/03. 1210 Brussel
Tel: +32 25248000 Fax: +32 25248120
e-mail: meddev@afmps.be – www.fagg-afmps.be

NL

distributeur:














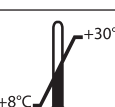

Théa Pharma B.V., Nederland, Mollerusweg 82B
2031 BZ Haarlem, Info.netherlands@theapharma.com

Gezondheidsinstantie:

The Health Care Inspectorate
Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht
Postbus 2680 3500 GR Utrecht
Tel: +31 88 120 50 000, e-mail: meldpunt@igz.nl – www.igz.nl

 0459

BETEKENIS VAN DE PICTOGRAMMEN OP DE VERPAKKING

	Fabrikant
	Lotnummer
	Productiedatum
	Houdbaar tot
	Temperatuur limieten
	Gesteriliseerd met behulp van aseptische processen
	Medisch hulpmiddel
	Raadpleeg gebruiksaanwijzing voor gebruik
	Eénmalig gebruik
	Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is
	Waarschuwing
	Buiten direct zonlicht bewaren
	Droog bewaren
	Catalogusnummer
	Unieke apparaatidentificatie

*
0
5
2
0
0
1
0
5
0
3
1
E
*

